

Ceramspray

Alkalmazási terület:

Szeparálóspray kerámiához. Modellek és a felvitt kerámiamassza szigeteléséhez.

Alkalmazási mód:

Használat előtt felrázandó.

5-8 cm távolságból egyszeri permetezés, majd várjanak kb. 1 percig, és azt követően egy újabb réteget vigyenek fel. Csak röviden permetezzenek. Kerüljék a tócsák képződését pl. a mély alveolákban. Célzott felvitel egy ecsettel szintén lehetséges.

Minőség:

A **Diaswiss Ceramspray** biztosítja a modellfelület megfelelő szigetelését a felvitt kerámiától és lehetővé teszi a modell problémamentes leemelését az égetés menetéhez. Nem áll fenn keresztkontaminációs veszély, mint az ecsetes palackok esetében. Az esetlegesen tapadó folyadék maradékok nélkül ég el.

Kockázatok:

Kerüljék a permet belélegzését.

Tárolás:

- A palack nyomás alatt áll.
- Ne tegyék ki közvetlen napsugárzásnak.
- Védjék 50°C fok feletti hőtől.

Ártalmatlanítás:

Az általános laboratóriumi hulladékkal (fémdobozok).

Gyártó:

DIASWISS S.A. ✱ Rte de St Cergue 293 ✱ CH-1260 Nyon ✱ Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14