

# SEPARATOR

DE

Separator ist eine gebrauchsfertige Lösung, mit der ähnliche Materialoberflächen ohne Haftung isoliert werden können.

Separator wird für Zahnfleischreproduktionen nach Modellen, die gemeinsam mit Gingifast Elastic Zhermack und/oder Gingifast Rigid Zhermack entwickelt wurden, und im Allgemeinen in jenen Fällen verwendet, bei denen eine Haftung zwischen kompatiblen Materialien verhindert werden soll. Separator kann auf Kondensationssilikon (Zetalabor, Titanium) aufgetragen und als Zusatz (Platinum) eingesetzt werden. Separator reduziert des Weiteren die Netzbildungshemmung der A-Silikone, die durch den Kontakt mit kompatiblen Materialien verursacht wird (z.B. Abdruckmaterialien auf Polyetherbasis). Um optimale Erfolge zu erzielen, wird nur bei Materialien auf Polyetherbasis empfohlen, mindestens 5 Stunden nach dem Abdruck mit dem Auftragen zu warten. Die Polyetherabdrücke müssen vor Separatoreinsatz sorgsam gewaschen und mit einem leichten Luftgebläse getrocknet werden.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Produkt kann sowohl direkt auf den trockenen Abdruck (direkte Technik), als auch auf eventuelle Silikonmasken (indirekte Technik) aufgetragen werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die zu isolierenden Oberflächen sauber und trocken sind.
  - Tragen Sie Separator mit einem kleinen Pinsel oder mit dem Set-Zerstäubungszubehör auf.
  - Warten Sie, bis Separator komplett getrocknet ist, damit die Oberfläche nicht matt wird.
- Mit einem leichten Gebläse kann die Trocknung beschleunigt werden.

## HINWEISE

Schließen Sie nach Gebrauch sorgfältig die Tube.

Es ist normal, dass sich eventuell Produkt oder die Bestandteile absetzen, dadurch wird die Produktqualität in keiner Weise beeinträchtigt; sollte dies passieren, schütteln Sie vor Gebrauch die Tube.

**NUR FÜR ODONTOTECHNISCHEN GEBRAUCH BESTIMMT**

**Zhermack**  
Dental

# SEPARATOR

separator for gingifast



**Zhermack S.p.A.**

Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy

T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596

info@zhermack.com | www.zhermack.com

